

CureMed Nordic AB är ett svenskt medicintekniskt företag med huvudkontor och lager i Göteborg. I vårt sortiment finner ni världsledande produkter inom sjukvård och medicinteknik varav många kan produceras kundanpassat. Vårt mål är att alltid erbjuda sjukvården innovativa produkter från ledande producenter på ett kostnadseffektivt sätt.

CureMed
NORDIC

StopHemo-H

BLODSTILLANDE VADD



Sparar tid för
både sjukvårds-
personalen och
patienten!

Används för att snabbt stoppa blödning från olika typer av sår samt vid näsblod

- Gör att blödningen stoppar snabbt
- Mycket bra blodstillande och absorberande egenskaper
- Sparar tid för sköterska och patient
- Fördelaktigt pris som minskar vårdkostnad
- En ren naturprodukt som baseras på havstång
- Används över helt världen
- Inga biverkningar eller hudirritation
- Latexfri och ftalatfri
- Smärtfritt när StopHemo-H avlägsnas
- Mycket väldokumenterad
- Varje förpackning 50 x 1 st sterilförpackade
- Beställning direkt från Curemed Nordic AB

ORDERINFORMATION

Produktnr	Produktnamn	Förpackning
SH50	StopHemo-H	50 st/frp

Hur använder man StopHemo-H?

Rengör såret enligt lokala rutiner

Applicera StopHemo direkt på såret och ta bort den när blödningen stoppat eller låt den sitta kvar för att förbättra sårsläckningen (ta bort inom 24 timmar). StopHemo-H kan användas tillsammans med lidokain lokalbedövningsmedel. Lägg en kompress över StopHemo-H och fäst med häfta.

Vid näsblödning

Vrid StopHemo-H så att du får en kompakt vadd. StopHemo kan fuktas med Natriumklorid eller Ringers lösning för att underlätta införandet. Applicera i den blödande näsborren och nyp i båda näsborrarna i 10 minuter. Låt StopHemo-H sitta på plats i 30 minuter och max 24 timmar.

För ytterligare information se bruksanvisning i förpackningen

WWW.CUREMEDNORDIC.SE