

# Jalosome® Gel



## Smärtstillande och antiinflammatorisk gel mot hudreaktioner i samband med radio- och kemoterapi

**Jalosome® Gel är den första och enda produkten speciellt utvecklad och framtagen för behandling av hudreaktioner i samband med radio- och kemoterapi. Genom de antiinflammatoriska och smärtstillande egenskaperna används den även för behandling vid andra hudinflammationer där rodnad, svullnad, klåda och smärta förekommer.**

### Patenterad verkningsmekanism

Den vattenbaserade gelen innehåller liposomer som kapslar in och transporterar övriga innehållsämnen genom det skyddande hornlagret. I de djupa hudlagren frisätts de aktiva ämnen som ger antiinflammatorisk och smärtstillande effekt. Genom denna patenterade metod sker läkningen av huden nerifrån och upp.

### Smärtreduktion, kliniskt dokumenterad

Jalosome® har i kliniska studier visat effekt på smärta, rodnad, klåda och obehag i samband med hudinflammation.

### Olje- och fettfri

Jalosome® Gel är olje- och fettfri vilket säkerställer att produkten kan användas under terapin oavsett grad av inflammation och samtidig användning av andra hudprodukter.

### Användning

Jalosome® Gel appliceras 2 gånger dagligen eller efter ordination. Behandlingen kan med fördel påbörjas 2 dagar innan terapistart. Effekt uppträder oftast inom 1-2 veckor. Gelen skall ej tvättas bort efter applicering. Skaka pumpflaskan innan varje behandling.

Används andra produkter för hudvård ordinerade av din läkare, säkerställ i vilken ordning de skall användas.

Vid känd allergi mot någon av innehållsämnenas avrådes användning.

### Förvaring

Förvaras i rumstemperatur. Varje pumpflaska är hållbar 7 dagar efter öppning.

### Innehåll

Vatten, L-Acetyl-L-Karnitin hydroklorid, Allantoin, Glycerin, hydrerad fosfatidylkolin, Natriumhyaluronat (1700 Kda), Natriumhyaluronat (200-400 Kda), Fenoxietanol.

*Detta är en CE-märkt medicinteknisk produkt.*